CHINESPORT S.p.A.

5. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

Gli interventi devono sempre essere eseguiti da personale adeguatamente istruito ed a conoscenza del libretto istruzioni.

- Ogni 6 mesi verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio (robustezza meccanica, serraggio delle viti, pulizia, ecc.).
- Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" (es.: urto, versamento di liquidi, ecc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.
- 3. Per la pulizia utilizzare un panno inumidito in acqua e detergente non aggressivo.

Avvertenze:

Non usare disinfettanti alcolici sulla similpelle del lettino.

La CHINESPORT dispone di un servizio telefonico per l'assistenza tecnica.

In caso di necessità contattare lo 0432/522315.

In orario diverso da quello commerciale è possibile comunicare a mezzo fax nº 0432-521792.

6. RICAMBI

Sono di seguito riportati i riferimenti per la richiesta dei ricambi delle parti sottoposte a maggiore usura.

	CODICE	DESCRIZIONE	n° pezzi per articolo
1	80.23.01.0114	MOLLA A GAS	1
2	85.23.01.0111	RULLO NERO SAGOMATO	2+1

6.1 GARANZIA

I riabilitatori CHINESPORT sono coperti da garanzia per il periodo di 12 mesi a partire dalla data registrata sul documento di spedizione. Durante tale periodo la CHINESPORT si impegna alla sostituzione o alla riparazione gratuita di quelle parti che dovessero essere difettose per fabbricazione. Non sono compresi: danni causati da trasporto e/o movimentazione, guasti e/o rotture imputabili ad un errato uso dell'apparecchiatura.

Le riparazioni sono eseguite presso i nostri rivenditori autorizzati e/o nella nostra sede alla quale, pertanto, dovranno essere recapitati gli eventuali resi con spese di trasporto a carico del cliente. Per ogni controversia l'unico foro competente è quello di UDINE.

Per rendere operante la garanzia, ed in ogni caso per reclami o assistenza di natura tecnica, contattare direttamente il nostro Responsabile Assistenza Tecnica.

7 SPECIFICHE TECNICHE E CONFORMITÀ

7.1 SCHEDA TECNICA

Denominazione articolo	Riabilitatore arti
Dimensioni cm (lxpxh)	71x83÷123x85÷125
Peso	Kg 35
Peso massimo ammissibile	Kg 135

7.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Denominazione prodotto

Riabilitatore arti a braccio oscillante art.03.4.07465

Braccio oscillante per riabilitatore art. 03.4.07466

Tipo di prodotto Riabilitatore per arti superiori ed inferiori

Classe di appartenenza

(art. 8 del D.Lgs. n.46 del 24/03/1997)

L'articolo sopradescritto è conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42.

CHINESPORT S.p.A. (Rapp.Legale)



CHINESPORT SPA Via Croazia, n°2 - 33100 UDINE - ITALY Tel. 0432 - 522315 - Fax 0432 - 521792



LIBRETTO D'ISTRUZIONI

RIABILITATORE ARTI A BRACCIO OSCILLANTE	03.4.07465
BRACCIO OSCILLANTE CON PESI	03.4.07466



PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

COMPLIMENTI! Avete acquistato un prodotto di qualità disegnato e costruito per esservi d'aiuto per lungo tempo purché utilizzato e mantenuto secondo le presenti istruzioni.

Potrebbero essere riscontrate delle variazioni tecniche sull'apparecchiatura, introdotte senza preavviso, nello sforzo continuo di migliorarlo ulteriormente.

AGGIORNAMENTO:02/07/01 1/4

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 COSTRUCTORE

CHINESPORT S.p.A. Via Croazia n°2 33100 UDINE - ITALIA TEL. 0432 522315 FAX 0432 521792

1.2 SCOPO E CONTENUTO DELLE ISTRUZIONI

Il Cliente deve leggere attentamente le informazioni riportate nel presente libretto.

Questo manuale ha lo scopo di fornire al Cliente tutte le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo dell'apparecchiatura, sia in grado di gestire la stessa in autonomia e sicurezza. Esso contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto in oggetto è rivolto agli utenti (medico - terapista) ed ai Tecnici abilitati alla manutenzione dell'apparecchiatura, deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

2. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

2.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il RIABILITATORE ARTI CHINESPORT è uno strumento che, usato sotto il controllo di un medicoterapista, permette di effettuare esercizi di riabilitazione e potenziamento degli arti superiori ed inferiori. I pianali imbottiti sono rivestiti in similpelle lavabile.

La struttura è costituita da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e le parti scorrevoli in acciaio cromato.

2.2 CONDIZIONI AMBIENTALI ED IMMAGAZZINAGGIO

L'apparecchiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all'interno di un edificio con temperatura ammesse da 5° a 40° C e con umidità compresa tra 10% e 80%.

In caso di immagazzinaggio si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali

- umidità relativa: 10% - 90 % - temperatura: -10 °C - +50 °C

3. SICUREZZA

3 1 AVVERTENZE GENERALI

L' utente deve leggere con attenzione le informazioni riportate nel presente Manuale, in particolare le precauzioni per la sicurezza elencate in questo capitolo.

3.2 USO PREVISTO

L'apparecchiatura è stata concepita e costruita esclusivamente per eseguire le funzioni descritte su questo Libretto istruzioni.

L'apparecchiatura non deve essere utilizzata:

- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- Senza la supervisione di un terapista
- Senza la prescrizione di uno specialista
- Esposta alle intemperie.


3.3 AVVERTENZE PARTICOLARI

- Tenersi ad adeguata distanza dalle parti in meccaniche in movimento durante lo svolgimento della terapia.
- Regolazioni e tarature vanno eseguite a macchina ferma.
- Serrare bene tutti i volantini prima dell'uso.
- Trasportare l'apparecchiatura sempre in due persone afferrando le gambe.
- $-\;\;$ La similpelle di rivestimento non resiste a temperature superiori a $50^{\circ} C.\;\;$
- Non sedersi sullo schienale
- L'asse di rotazione del braccio oscillante deve essere in linea con quello dell'arto in trattamento durante l'uso.

4. MESSA IN FUNZIONE

CHINESPORT S.p.A.

4.1. PRINCIPALI COMPONENTI

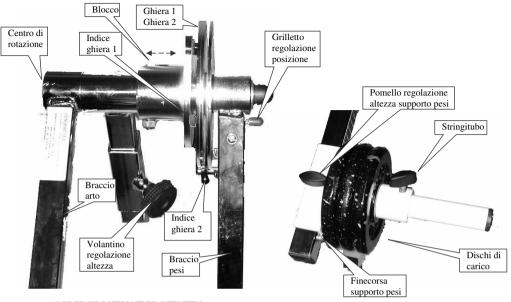

4.2 PREDISPOSIZIONE ED UTILIZZO

Eseguire le operazioni nel seguente ordine:

- 1. Estrarre l'apparecchiatura, le dotazioni dall'imballo e trasferirle nel luogo d'uso.
- 2. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia in situazione di buona stabilità .
- Infilare il braccio oscillante nell'apposita predisposizione laterale Dx o Sx a seconda dell' arto da trattare. Serrare quindi il volantino regolazione altezza (per un corretto utilizzo dell'apparecchiatura il centro di rotazione del braccio arto deve corrispondere con quello dell'arto da trattare).
- 4. Regolare la posizione dello schienale nella posizione desiderata agendo sulla leva di blocco della molla a gas di regolazione posta nel retro della sedia; con lo schienale totalmente reclinato è possibile eseguire esercizi in posizione prona.
- Regolare il posizionamento e l'angolazione del braccio oscillante in funzione dell' esercizio e delle prescrizioni del medico - terapista:
 - a) Tirare il blocco verso il braccio arto.
 - Regolare l'angolazione di "andata" ruotando la ghiera 1 fino al punto desiderato e spingere il blocco verso la ghiera di una posizione.
 - Regolare l'angolazione di "ritorno" ruotando la ghiera 2 fino al punto desiderato e spingere il blocco verso la ghiera fino a finecorsa.
 - d) Se del caso regolare la posizione del braccio pesi svincolandolo dal braccio arto tramite il grilletto di regolazione posizione
- 6. Applicare gli appositi dischi di carico, in funzione dell' esercizio e delle prescrizioni del medico-terapista, al braccio pesi e assicurarli con lo stringitubo (i dischi peso in eccesso possono essere posizionati negli appositi portapeso situati sulle gambe posteriori dell' apparecchiatura).
- Vincolare le cosce alla seduta abbassando con l'apposito fermacosce e l'arto al braccio arto con l'apposita cinghia.
- 8. Eseguire il trattamento.